

Warm-Keepit HS22M

調乳した温かいミルクをそのまま保温

保冷したミルクを温めることは出来ません。

この保温庫HS-22Mは調乳したミルクをそのまま保温する為の専用です。

<お客様へお願い>

1時間以上の保温は赤ちゃんのためおやめ下さい。

哺乳ピンを振ってから赤ちゃんにあげて下さい。

本機は水を入れる必要はありません。

(注意 水を入れての使用は出来ません。)

<ご使用方法>

まとめて数人分を作ってしばらくしてから使用する。

飲まないのしばらくしてから使用する。

おしぼりを袋に入れて温めておく。

<用途>

本機は幼稚園・託児所・一般家庭などで手軽に使える
ほ乳ピン保温機です。

<製品仕様>

機能	保温
使用電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	20W「電気料金 約0.38円 / 1時間」
外形寸法	W270×D210×H190
内容量	W220×D165×H130
本体重量	2.2kg
本体材質	本体 耐熱ABS 透明カバー PS
本体カラー	ライトイエロー
透明カバー部カラー	透明
コード長	2m
日本製	



WARM-KEEPIT HS-22M

湯せんを使わない

ドライタイプ保温庫の特徴

1. 毎日のお手入れが簡単
2. 院内感染の予防に効果的

哺乳びんの保温について HS-22M

この保温庫HS-22Mは保育園で200 mL程の哺乳びんの保温用です。

100 mL程の哺乳びんの場合はやや熱くなります。「注意」

病院で哺乳びんが混在する場合はWARM-KEEPIT / HH108EUをお使い下さい。

この保温庫HS-22Mの底部の温度分布は図のようになっています。

哺乳びんの大きさや量により温度が異なる場合があります、小さい哺乳びん
や少ない量の場合は下記の説明のようにすることで多少温度が変わります。



この部分は温度が高めです。


冷蔵庫などで保冷していた哺乳びんを置くのに適しています。
哺乳びんの大きさによりことなりなが長い時間ではやや熱く
なるので注意して下さい。



この部分は温度が低めです。

調乳した温かい哺乳びんを置くのに適しています。
左右および前のフチに接触するような置き方をして下さい。
適温から約2～3 高い温度で保温をします。

【保温庫を上から見た図】

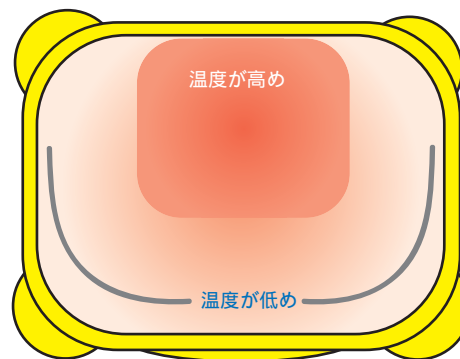

前

Accessory

【用途】 哺乳瓶 / 点滴容器 / 蒸留水 / 食塩水 / 洗浄液 / その他の保温(これらの容器は200mlまで)

KEEPIT 株式会社 生田産業 キープイット販売部

TEL 0268-35-1104 or 1536 FAX 0268-35-1561

〒386-0407 長野県上田市長瀬3951-1

e-Mail ikutan@coral.ocn.ne.jp