

救急車搭載対応機種 輸液用コンパクト定温庫HH108RA-F2は500mlのソフトバッグが2本用です。

【内容】この機種は液を均一に温めることと温度設定値を高精度で維持するために送風口の温度センサーで平均値を出し制御をし、液を均一に効率よく温めるために温風が左右から吹き出して庫内全体に行き渡ります。また、消費電力は100V/40Wの省電力仕様です。

**WARM-KEEPIT / HH108RA-F2**

ウォームキープイット

このRA-F2は 500ml ソフトバッグ用。

温まるまでの時間の目安  
約180~240分(500ml)

**All-round Warmer**

(2本用/500ml)

操作性、機能性、使いやすさを追求したニュータイプコンパクト設計です。



商品名 輸液用コンパクト定温庫  
機種番号 HH108RA-F2  
入り数: 輸液500ml×2本用、ブドウ糖液ヒリンジ20mlなど  
用途適応: 救急車搭載または少使用オペ室

【救急車搭載】の固定について 「下記図参照」

脚を回転するとレールへの固定用穴があります。また、後部補助席の下に置くことも出来ます。


【基本仕様】

- 電 源 40W/100V(省電力仕様)
- コンセント 3P
- 本体寸法 W240×D185×H300
- 温度設定範囲 周囲温度プラス2℃～48℃
- 温度設定単位 0.1℃単位
- 温度表示単位 0.1℃単位
- 設定変更保護 「▲▼」+「MODE」  
「▲▼」のみの場合20秒後に前の設定値に戻る
- 転倒防止用脚 脚を回転することで脚が前後に長くなり転倒防止
- 安全回路
  1. 過電流保護
  2. 過熱防止回路/設定値プラス2℃で加熱信号を遮断。
- 本体材質 SPCC/粉体硬質塗装
- 扉・窓材質 PET
- 扉の蝶番 スローダウン仕様
- ホルダー ソフトバッグを確実に固定する挿入タイプ

【使用方法】

1. コンセントを入れる。
  2. 電源スイッチ「Power」を入れる。
  3. 温度設定 電源をOFFしても前の設定値を記憶しています。
- 商品の生産 国内生産

レールへの取り付け図

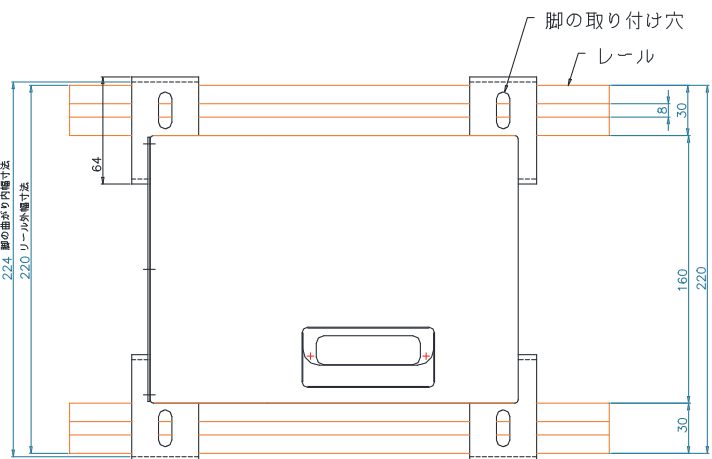

天面図(上から見た図)

型番	内容量	本体寸法(W×D×Hmm)	温度(℃)	価格(税抜)
HH108RA-F2	2本/500ml	240×185×300	~46	168,000